

Glastyp	Degression	Anteil der Degression am Kreuz
Office A	0,75	70%
Office B	1,25	80%
I-Work	0,75	100%
	1,25	80%
	1,75	75%
Insight	0,75	100%
	1,00	80%
	1,25	80%
	1,50	75%
	1,75	75%
	2,00	70%
	2,25	70%

100% der Degression werden beim Insight und beim I-Work ca. 3 mm oberhalb des Zentrierkreuzes erreicht (Ausnahme Insight und I-Work mit Degression 0,75) und beim Office ca. 4mm oberhalb.

Bei der Zentrierung der Gläser ist daher darauf zu achten, dass der Abstand vom Zentrierkreuz zum oberen Fassungsrand mindestens 10mm betragen sollte, da es sonst zu Problemen im Fernbereich kommen kann.

Bitte beachten Sie unbedingt auch unsere Hinweise bezüglich eines physiologischen Arbeitsplatzes bei der Beratung des Kunden und der Einarbeitung der Gläser.

Sollten Sie weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie gerne unser Kollegen im Kundencenter unter der folgenden Telefonnummer: +49(0)7621 91 490-0. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Arbeitsplatzgläser von Visall - und die Arbeit wird leichter!